



EN 166: 2001

PRODUCENT

PORTWEST, IDA Business Park, Westport, Co Mayo, F28 FY88, Ireland

Navn og adresse på det bemyndigede organ, der har udstedt EU certificering

Bemyndigede organ: Module B and C2 - SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P, Irland (bemyndiget organ 2777).

DK

CV15, CV17 300 Micron APET ansigts visir (100)



Disse produkter er klassificeret som kategori III personligt beskyttelsesudstyr (PPE) i henhold til den europæiske PPE-forordning (EU) 2016/425 og har vist sig at overholde denne forordning gennem begrænset test mod den harmoniserede europæiske standard EN 166: 2001 (se nedenfor).

Dette produkt er designet til at give en vis beskyttelse mod kontakt med luftbårne dråber, der kan udgøre en biologisk fare.

Husk dog altid, at ingen personlige væremidler kan yde fuld beskyttelse, og der skal altid udvises forsigtighed, når du udfører den risikorelaterede aktivitet.

Brug aldrig dette visir til beskyttelse mod andre farer, som produktet ikke er designet til eller testet mod.

YDELSE OG BEGRÆNSNINGER AF BRUG

Disse produkter er testet i overensstemmelse med EN 166: 2001

Klausuler: 6 ; Design; 7.1.1 ; Synsfelt; 7.1.2.1 ; Brydningsevner 7.1.2.2 ; Transmission; 7.1.2.3 ; Diffusion af lys; 7.1.3; Kvalitet af materialer; 7.1.5.1 ; Stabilitet ved forhøjet temperatur; 7.1.7 ; Tændingsmodstand 7.2.4 ; Dråber og væskeoprøjt

MONTERING OG STØRRELSE

For at tage produkter på og af, se brugervejledningen. Brug kun produkter af en passende størrelse, der er justeret korrekt. Produkter, der er for løse, kan falde af, og hvis de er for stramme, vil det være ubehageligt.

KOMPATIBILITET

For at optimere beskyttelsen er det nødvendigt at bruge disse produkter med egnede handsker / kittler / masker. I dette tilfælde skal du konsultere din leverandør eller tilsynsførende inden du udfører den risikorelaterede aktivitet for at sikre, at alle dine beskyttelsesprodukter er kompatible og egnede til din opgave.

ADVARSEL

Dele af visiret, der kommer i kontakt med din hud, kan føre til allergiske reaktioner. I dette tilfælde skal du afbryde brugen og søge lægehjælp.

OPBEVÆRING OG TRANSPORT

Opbevar visiret, når det ikke er i brug, et godt ventileret sted væk fra ekstreme temperaturer. Anbring aldrig tunge genstande oven på den. Hvis det er muligt, undgå overdreven foldning og opbevar det helst hængende lodret. Hvis produktet er vådt, skal du lade det tørre helt, før det opbevares. Opbevar produktet på et mørkt sted væk fra sollys, når det ikke er i brug.

Brugstid

Dette visir har en holdbarhed på 3 år. Levetiden afhænger af anvendelsesforholdene, men visiret skal bortskaffes og udskiftes, hvis det er hårdt ridset eller beskadiget på en eller anden måde forhindrer sikker brug

REPARATION

Hvis visiret bliver beskadiget, giver det IKKE det optimale beskyttelsesniveau og bør derfor straks udskiftes. Brug aldrig et beskadigede produkt. Hvis du er i tvivl, skal du altid kontakte producenten, inden du prøver på en reparation.

Renngøring

Brug kun følgende anbefalede rengørings metoder - Skyl med varmt sæbevand brug ALDRIG opløsningsmiddelbaserede rengøringsmidler.

Barberblade eller andet skarpt værktøj, slibende eller stærkt alkaliske rengøringsmidler, opløsningsmidler, blyholdig benzen og

carbontetrachlorid bør ikke anvendes.

Brug en mikrofiberklud, der er fugtet med vand.

I tilfælde af større ophobning af snavs eller fedtede pletter, skal du bruge acetone - og benzenfri opløsningsmiddelrensere eller fortyndervæsker.

NB: Alt ovenstående gælder kun på ydersiden af visiret, hvor der ikke er påført anti dug belægning.


COVID 19 anbefalingerne er, at alle medarbejdere vasker deres visir i slutningen af arbejdsdagen i varmt sæbevand.

MÆRKNING

Produktet er mærket med:

- CE-mærket, der viser, at produktet opfylder kravene i PPE-forordningen (EU) 2016/425.
- Identifikation af producenten og produktkoden / artikelnummeret.
- Piktogrammet, der angiver, har læst disse instruktioner


MONTAGE DIAGRAM

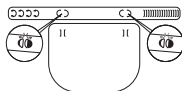

1. Fold tapperne på hovedbåndsremmen som vist



2. Indsæt tapperne på hovedbåndet i åbningerne på det klare skærm.

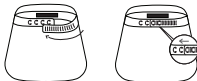

3. Brug tappene og slidserne i remmen, og juster stroppen til den ønskede størrelse.