



EN 166: 2001

RAŽOTĀJS

PORTWEST, IDA Business Park, Westport, Co Mayo, F28 FY88, Ireland

Paziņotās iestādes, kas izsniegusi EC sertifikātu, nosaukums un adrese

Paziņotā institūcija: B un C2 modulis - SATRA Technology Europe Ltd, Brace-town Business Park, Clonee, D15YN2P. Īrijs Republika (pilnvarotā iestāde 2777).

LV

CV15, CV17 300 mikronu APET sejas aizsargs (100)



Šie izstrādājumi ir klasificēti kā III kategorijas individuālās aizsardzības līdzekļi (IAL) saskaņā ar Eiropas IAL regulu (ES) 2016/425, un ir pierādīts, ka tie atbilst šai regulai, veicot ierobežotu testēšanu atbilstoši saskaņotajam Eiropas standartam EN 166: 2001 (skatīt zemāk).

Šis produkts ir paredzēts, lai nodrošinātu zināmu aizsardzību pret saskari ar gaisā esošām pilieniņiem, kas var radīt bioloģisku apdraudējumu. Tomēr vienmēr atcerieties, ka neviens IAL objekts nevar nodrošināt pilnīgu aizsardzību, un, veicot ar risku saistītās darbības, vienmēr jābūt uzmanīgiem. Nekad nelietojiet šo vizieri aizsardzībai pret citiem apdraudējumiem, kuriem izstrādājums nav paredzēts vai nav pārbaudīts.

IZMANTOŠANA UN LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI

Šie produkti ir pārbaudīti saskaņā ar EN 166: 2001 Klauzulas: 6; Dizains; 7.1.1; Redzes lauks; 7.1.2.1; Refrakcijas spējas; 7.1.2.2; Caurlaidība; 7.1.2.3; Gaismas difūzija; 7.1.3; Materiālu kvalitāte; 7.1.5.1; Stabilitāte paaugstinātā temperatūrā; 7.1.7; Izturība pret aizdegšanos; 7.2.4; Šķidrumu pilieni un šļakatas

PIELĀGOŠANA UN IZMĒRS

Lai uzvilktu un noņemtu produktu, lūdz, skatiet lietotāja instrukcijas. Valkājiet tikai piemērotā izmēra izstrādājumus, kas ir pareizi noregulēti. Produkti, kas ir pārāk vaļīgi, var nepalikot vietā, un, ja tie ir pārāk stingri, būs neērti.

SADERĪBA

Lai optimizētu aizsardzību, šie produkti būtu jālieto ar piemērotiem cimdziem / halātiem / maskām. Šajā gadījumā pirms ar risku saistītās darbības veikšanas konsultējieties ar savu piegādātāju vai uzraugu, lai pārļiecinātos, ka visi jūsu aizsarglīdzekļi ir savietojami un piemēroti jūsu lietošanai.

BRĪDINĀJUMS

Vizora daļas, kas nonāk saskarē ar ādu, var izraisīt alerģiskas reakcijas. Šajā gadījumā, lūdz, pārtrauciet lietošanu un meklējiet medicīnisko palīdzību.

UZGLABĀŠANA UN TRANSPORTS

Kad to nelieto, glabājiet vizieri labi vēdināmā vietā prom no augstas vai zeams temperatūras. Nekad nelieciet tam virsū smagus priekšmetus. Ja iespējams, izvairieties no pārmērīgas locīšanas un, vēlams, uzglabājiet to vertikāli. Ja produkts ir slapjš, ļaujiet tam pilnībā nožūt, pirms to novietojat noliktavā. Lūdz, uzglabājiet produktu tumšā vietā, prom no saules gaismas, kad to nelieto.

PĀRBAUDE

Šī viziera derīguma termiņš ir 3 gadi. Kalpošanas laiks būs atkarīgs no lietošanas apstākļiem, bet, ja tas ir stipri saskrāpēts vai bojāts,

novērs drošu lietošanu

REMONTS

Ja vizieris sabojājās, tas nenodrošinās optimālo aizsardzības līmeni, tāpēc tas nekavējoties jāmaina. Nekad nelietojiet bojāto produktu. Ja rodas šaubas, pirms remonta vienmēr konsultējieties ar ražotāju.

TĪRĪŠANA

Izmantojiet tikai šādu ieteicamo tīrīšanas procedūru: Noskalojiet ar siltu ziepjūdeni NEKAD nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kuru pamatā ir šķīdinātājs.

Nevajadzētu lietot žiletus vai citus asus instrumentus, abrazīvus vai stipri sārmains mazgāšanas līdzekļus, šķīdinātājus, svina benzolu un tetrahloroglekli. Izmantojiet mikrošķiedras drānu, kas vienkārši samitrināta ar ūdeni.

Īpaši lielu neīrimumu vai taukainu traipu uzkrāšanās gadījumā izmantojiet šķīdinātājus vai atšķaidītājus, kas nesatur šķīdinātājus ar benzolu.

PIEZĪME: Viss iepriekš minētais attiecas tikai uz viziera ārpusi, kur nav uzklāts Anti Fog pārklājums.


COVID 19 ieteikumi ir, ka visi darbinieki visās nozarēs darba dienas beigās nomazgā savu vizieri tikai siltā ziepjūdenī.

MARKĒŠANA


Produkts ir marķēts ar:

- CE zīme, kas parāda, ka produkts atbilst IAL regulas (ES) 2016/425 prasībām.
- Ražotāja identifikācija un produkta kods / izstrādājuma numurs.
- Instrukcijas piktogramma, kas norāda, izlasiet šos norādījumus


MONTĀŽA DIAGRAMMA

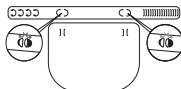

1. Lieciet galvas lentes kā parādīts

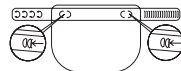

2. Ievietojiet gumiju caurspīdīgā vairoga malās.

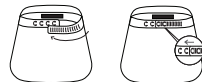

3. Izmantojot siksnu noregulējiet vairogu vēlamajā formā.